

# Páteřní deska BaXstrap Spineboard


**Probo**  
VŠE PRO HASIČE

## Použití:

Páteřní deska BaXstrap se používá s přídatnými zařízeními určenými ke znehybnění páteře a hlavy. Tato pomůcka pomáhá provést znehybnění v rovné a neutrální poloze a lze ji použít při přepravě dospělých a dětí.

Tato páteřní deska se používá u pacientů s podezřením na poranění páteře nebo míchy, když je nezbytné provést znehybnění a přepravu pacienta.

Nejsou známy žádné kontraindikace.

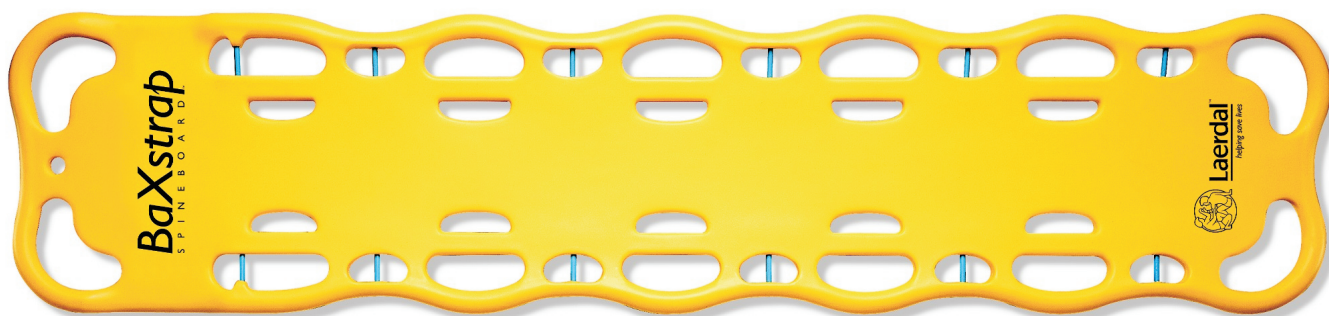

## Výstrahy a varování

**Pozorně si přečtěte tyto pokyny.**

**Tyto pokyny nejsou doporučením nebo pokynem k léčbě nebo k výuce zdravotnických úkonů a v žádném případě taková doporučení a pokyny nenahrazují.**

**Tuto pomůcku a další pomůcky ke znehybnění páteře smí používat pouze příslušně proškolené osoby. Nepoužívejte tento výrobek, je-li poškozen nebo není-li zaručena jeho 100% funkčnost.**

**Před prvním a každým použitím na pacientovi proveďte důkladnou kontrolu.**

## Použití:

1. Znehybněte páteř pomocí odpovídající pomůcky ke znehybnění.
2. Uložte pacienta na páteřní desku BaXstrap. Tento úkon musí být proveden dostatečným počtem osob.
3. Desku BaXstrap k pacientovi řádně upevněte/uvažte, aby nemohlo dojít k pohybu pacienta v žádném směru (nahoru, dolů, doleva nebo doprava).
4. Upevněte hlavu pacienta k desce BaXstrap pomocí příslušné pomůcky ke znehybnění hlavy. Zajistěte, aby se hlava, krk, torzo a pánev nacházely v přímé a neutrální znehybněné poloze.

## Čištění:

Tato pomůcka nevyžaduje sterilizaci.

Čistěte v mýdlové vodě (1:16) a vodném roztoku chlornanu sodného (SAVO) (1:100).

Poznámka: Při manipulaci s pacientem a jeho znehybnění vždy postupujte dle platného protokolu.

**CE** Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice Council Directive 93/42/EEC týkající se zdravotnických výrobků.

Provozovna Nový Bor  
PROBO - Petr Machara  
Rumburských hrdinů 819  
473 01 Nový Bor

tel/fax: +420 487 723 993  
mobil: +420 777 182 814  
email: info@probo-nb.cz

tel/fax: +420 485 108 141  
mobil: +420 724 328 771  
email: liberec@probo-nb.cz

Provozovna Liberec  
PROBO - Petr Machara  
U Náspu 5  
460 01 Liberec

www.probo-nb.cz  
tel. SR +421 944 316 416